

Legierungsdatenblatt

Argedent Y73

CE 0086

Dentale Metallkeramik-Legierung auf Goldbasis gem. EN ISO 22674

Typ										4	
Anwendungsbereich										4,5,6	
Farbe										gelb	
Gold / Platin Metalle										87,8 %	
Au	Pt	Pd	Ag	Metalle der Pt-Gruppe	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Sonstige Metalle	
73,8	8,5	5,4	8,98	Ru(<1), Re(<1)	-	-	-	1,9	-	(Fe, Mn, Nb, Ta, Li <1,0)	

Dichte	16,7 g/cm ³
Vickershärte	g/b=215 a=225
Dehngrenze	g/b=386 a=483 MPa
Bruchdehnung	g/b=15% a=10%
E-Modul	104 GPa

Vorwärmtemperatur	790°C
Schmelzintervall	1050-1170°C
Gießtemperatur	1285°C
Einbettmasse	P2
Tiegel	G/K
Vergüten	600°C/10 min.

mittlerer WAK-Wert 25-500°C	14,3 10 ⁻⁶ ·K ⁻¹
mittlerer WAK-Wert 25-600°C	14,5 10 ⁻⁶ ·K ⁻¹
Lote (vor)	Y, YPF
Lote (nach)	750 Y, LO
Achtung: Nur gereinigte Gusskegel verwenden, mindestens 1/3 Neumaterial begeben!	Rev.D.02.16

1 Gusslegierung für Inlays u. Einzelkronen	6 Aufbrennlegierung f. Brücken jeder Spannweite	G Graphittiegel
2 Gusslegierung für Einzelkronen u. kl. Brücken	7 Anterior-Einzelkronen und max. 3gl. Brücken	K Keramiktiegel
3 Gusslegierung für Brücken jeder Spannweite	8 Für Presskeramik (Herstellerangaben beachten)	G1 Gipsgebunden
4 Aufbrennlegierung für Einzelkronen u. kl. Brücken	9 Fräs-, Konus- und Teleskoptechnik	P1 Phosphatgeb. graphitfrei
5 Aufbrennlegierung für mittlere Brücken	10 Modellguss	P2 Phosphatgebunden

(**) Hierzu bitte die Herstellerangaben der Keramikfirma beachten, insbesondere die WAK-Werte

Hinweise:

Beim Schleifen oder Polieren Stäube nicht einatmen. Geeignete Schutzmaske und Absaugung verwenden.

Metallische Elemente können in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen und elektrochemisch bedingte Missempfindungen auslösen. Bei Überempfindlichkeiten gegen einzelne Elemente einer Legierung darf diese nicht verwendet werden.

Unsere Informationen und Empfehlungen beruhen auf dem heute bekannten Stand der Wissenschaft und Technik und sind nach unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt als korrekt anzusehen. Sie enthalten keine Eigenschaftszusicherung. Die vorstehende Version ersetzt alle früheren Angaben.