

Argen Dental lässt Kunststoffe erstrahlen

## KlassePaste zum Polieren



**Hygienisch – sauber – polieren! Klasse finden Zahn-  
techniker die gleichnamige Polierpaste mit zwei Kom-  
ponenten von Argen Dental.**

Genutzt wird die Polierpaste im Laboralltag für alle Kunststoffe sowie Kunststoffzähne und bringt den großen Vorteil der sauberen Bearbeitung – ohne Bimsstein. Zahntechniker nutzen die grüne KlasseBase zur trockenen Vorpolitur von Prothesenkunststoffen. Mit der rosafarbenen KlasseGlaze erfolgt der Hochglanz für die Versorgungen. Empfohlen wird für beide Polierpasten eine weiche Polierbürste bei geringem Druck und niedriger Drehzahl. Und auch die Politur am Arbeitsplatz mit dem Handstück wird ermöglicht.

### Big Points:

- Hygienischer Ersatz für die Politur mit Bimsstein
- Beste Ergebnisse bei Verwendung von Ziegenhaarbürsten
- KlassePaste ist verwendbar für Kunststoffe, Komposite und Metallflächen
- Hochglänzende Oberflächen bei allen polierten Versorgungen

### Die Bestellssets beinhalten:

- KlasseBase: zwei Stangen à 1200g
- KlasseGlaze: eine Stange à 1200g

[www.agen.de](http://www.agen.de)