

# Mehrwert für das gesamte Praxisteam

**Permadental:** Der neue Katalog „Zahnersatz von A bis Z“

Neu gestaltet und um weitere praxisrelevante Seiten ergänzt, so präsentiert Permadental seinen neuen Katalog „Zahnersatz von A bis Z“. Das Compendium 2023 des Komplettanbieters für dentale Lösungen bietet allerdings weit mehr als nur Zahnersatz: Konzipiert für das gesamte Team in Zahnarzt- und kieferorthopädischen Praxen, ermöglichte der neue, 60 Seiten starke Katalog einen Einblick in das umfassende Leistungsportfolio von Permadental. Angefangen bei neuen Produkten und Tools für die Patientenberatung, Diagnostik und Planung, bis hin zur Therapie und zu Fortbildungsangeboten.

## Umfangreiche Materialauswahl

„Indikationen, Spezifikationen, eine umfangreiche Materialauswahl und Preisbeispiele generieren Seite für Seite einen Mehrwert für das gesamte Praxisteam und erhöhen den Nutzen für den täglichen Praxiseinsatz“, betont Wolfgang Richter, Marketingleiter bei Permadental. „Ein attraktives Layout mit großformatigen Fotos und Grafiken, mögliche Workflows und

plausible Erläuterungen ermöglichen einen ebenso gründlichen wie zeitsparenden Überblick. Vertriebsinformationen und Produktpreise nehmen erneut nur den unbedingt notwendigen Platz im Katalog ein.“ 37 Jahre Erfahrung mit schönen Zähnen stecken in der aktuellen Ausgabe des Katalogs, den viele Praxen gerne nutzen. Meist griffbereit platziert, werde das Compendium nicht nur von Zahnmedizinern und ihren Teams genutzt, sondern auch zusammen mit der angebotenen Broschüre für die Patientenberatung für Aufklärungsgespräche eingesetzt.

Der neu gestaltete Katalog „Zahnersatz von A bis Z“ spiegelt nicht nur jahrzehntelange dentale Kompetenz wider, er visualisiert auch besonders übersichtlich das umfangreiche Angebot eines der größten Dentallabore der Welt. Vom Scannerangebot über festsitzenden oder herausnehmbaren Zahnersatz, vom KFO-Gerät bis zum modernen Alignersystem, vom Schlafschienenangebot über das neue Bleachingssystem *Boutique* bis hin zu digitalen Services wie *Smile-Design* und digital hergestellten Prothesen.

## Als E-Paper oder Printausgabe

„Alles aus einer Hand“ bringe Vorteile für jedes Praxisteam. Im neuen Katalog werden auch verschiedene Möglichkeiten für ein Patientenberatungsgespräch, einen Zahnkredit für Patienten und moderne Fortbildungsmöglichkeiten für Praxisteams aufgezeigt.

Der neue Katalog in der aktuellen Version für das Jahr 2023 ist als E-Paper oder als Printausgabe erhältlich. Praxen können online, telefonisch unter (0 28 22) 7 13 30-22 oder per E-Mail an [kundenservice@permadental.de](mailto:kundenservice@permadental.de) kostenlos weitere Printexemplare oder eine digitale Version anfordern.



Foto: Permadental

## Zirkon Tool-Set

**Argen Dental:** Schleifen – Glätten – Polieren

Mit 14 rotierenden Instrumenten zur perfekten Oberfläche bei Zirkonversorgungen – das Ziel erreichen Zahntechniker laut Argen Dental mit dem neuen Zirkon Tool-Set. Für eine besonders schonende und gleichzeitig effiziente Bearbeitung von Zirkon-Gerüststrukturen seien hochwertige Diamanten, Polierer und Gummiereisen mit einer Schaftstärke von 2,35 mm zusammengestellt worden. Die rotierenden Instrumente für Zirkon bieten dem Zahntechniker einen optimierten Abtrag bei wirtschaftlicher Standzeit an.

Die Zirkonspezialisten von Argen Dental empfehlen Zahntechnikern folgende Schritte zur umfassenden Zirkonbearbeitung:

1. Beschleifen und Entfernen von überschüssigem Material auf vor-

gesintertem Zirkonoxid mit speziell entwickelten Zirkondiamanten bei einer Umdrehung von optimal 8.000 bis maximal 20.000 Umdrehungen/min

2. Glätten der Oberfläche auf nachgesintertem Zirkonoxid mit speziellen Diamanten mit leichten Schmitteigenschaften bei einer Umdrehung von optimal 15.000 bis maximal 20.000 Umdrehungen/min. Dünnwandige Bereiche in den Randzonen lassen sich sehr gut ausarbeiten und ohne „Splitterungen“ definieren.

3. Politur des nachgesinterten Zirkons mit extra-beziehungsweise mittelgrober Spezialscheibe aus diamantbesetztem Gummi bei einer Umdrehung von optimal 6.000 bis maximal 20.000/min.

[www.argin.de/shop](http://www.argin.de/shop)



Komplettes Zirkon Tool-Set mit 14 rotierenden Instrumenten

Foto: Argen Dental



PLANMECA  
**IDS**  
Halle: 1.2  
Stand: A020/C029

## Planmeca Compact™ i5 Wegweisend Richtung Zukunft

- Ergonomisches Arbeiten durch individuelle Einstellbarkeit
- Langfristig investieren durch zeitloses Design und hochwertige Verarbeitung
- Technische Fernwartungsmöglichkeit durch Vernetzung mit der Praxismanagementssoftware
- Entspanntere Patienten durch Polster Ultra Relax™ – eines der weltweit weichsten Polster

CE 0598 MD Planmeca Compact i5 [www.planmeca.de](http://www.planmeca.de)

**PLANMECA**

**Plandent**

PLANMECA ist in Deutschland erhältlich bei: Plandent GmbH und Co. KG  
Schuckertstraße 21, 48153 Münster, Tel.: 0251/7607-550, Freefax: 0800/78015-17  
Einrichtung@plandent.de, plandent.de/Planmeca