

Argen Dental:

Zirkon tool-set für perfekte Oberflächenbearbeitung



Mit 14 rotierenden Instrumenten zur perfekten Oberfläche bei Zirkonversorgungen – das Ziel erreichen Zahntechniker mit dem neuen Zirkon tool-set. Für eine besonders schonende und gleichzeitig effiziente Bearbeitung von Zirkon-Gerüststrukturen hat Argen Dental hochwertige Diamanten, Polierer und Gummierscheiben mit einer Schaftstärke von 2,35 mm zusammengestellt. Die rotierenden Instrumente für Zirkon bieten dem Zahntechniker einen optimierten Abtrag bei wirtschaftlicher Standzeit an.

Empfohlene Schritte zur umfassenden Zirkonbearbeitung:

1. Beschleifen und Entfernen von überschüssigem Material auf vorgesinterem Zirkonoxid mit speziell entwickelten Zirkondiamanten bei einer Umdrehung von optimal 8.000 - maximal 20.000 Umdrehungen/min.
2. Glätten der Oberfläche auf nachgesinterem Zirkonoxid mit speziellen Diamanten mit leichten Schnitteigenschaften bei einer Umdrehung von optimal 15.000, maximal 20.000 Umdrehungen/min. Dünnwandige Bereiche in den Randzonen lassen sich sehr gut ausarbeiten und ohne „Splitterungen“ definieren.
3. Politur des nachgesinteren Zirkons mit extra- bzw. mittelgrober Spezialscheibe aus diamantbesetztem Gummi bei einer Umdrehung von optimal 6.000, maximal 20.000/min.

Bestellungen im Argen Online-Shop: <https://www.argen.de/shop/>, beim Außendienst oder telefonisch 0211-355 965-0.

Kontakt:

ARGEN Dental GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 12
D-40547 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 / 35 59 65-0
info@argen.de
www.argen.de