

Manuell hergestellte Sägemodelle: Präzisionsgips für Passgenauigkeit

Optimiert für weitspannige Implantat- und Brückenrestorationen ist Zero rock mit 0 % Expansion einer der wichtigsten Bausteine auf dem Weg zur hohen Präzision. Die thixotrope Konsistenz des Gipses erleichtert das Ausgießen der Abformung. Dank hoher Kantenstabilität lässt sich nach dem Aushärten die Präparationsgrenze exakt und sauber freilegen. Mit diesen drei herausragenden Merkmalen ist Zero rock ein echter Geniestreich von dentona. Damit unterstreichen die Dortmun-

der Experten einmal mehr ihre fundierte dentale Werkstoff-Expertise. Und sie zeigen, dass dentona zusätzlich zu digitalen Produkten auch das Analoge noch bestens beherrscht. ▣

Kontakt

dentona AG

Otto-Hahn-Straße 27

44227 Dortmund

Tel.: 0231 5556-0, Fax: 0231 5556-30

mailbox@dentona.de

🌐 www.dentona.de

Schleifen – glätten – polieren


Mit 14 rotierenden Instrumenten zur perfekten Oberfläche bei Zirkonversorgungen – das Ziel erreichen Zahntechniker mit dem neuen Zirkon tool-set. Für eine besonders schonende und gleichzeitig effiziente Bearbeitung von Zirkon-Gerüststrukturen hat Argen Dental hochwertige Diamanten, Polierer und Gummiescheiben mit einer Schaftstärke von 2,35 mm zusammengestellt. Die rotierenden Instrumente für Zirkonoxid bieten dem Zahntechniker einen optimierten Abtrag bei wirtschaftlicher Standzeit an.



▣ Komplettes Zirkon tool-set mit
14 rotierenden Instrumenten

DIE ZIRKONOXIDSPEZIALISTEN VON ARGEN DENTAL empfehlen Zahntechnikern folgende Schritte zur umfassenden Zirkonoxidbearbeitung:

1. Beschleifen und Entfernen von überschüssigem Material auf vorgesintertem Zirkonoxid mit speziell entwickelten Zirkondiamanten bei einer Umdrehung von optimal 8.000 - maximal 20.000 Umdrehungen/min.

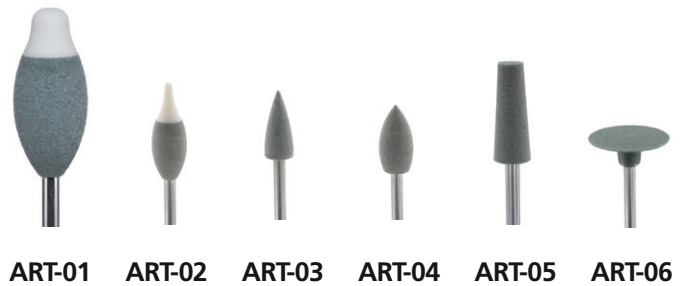

2. Glätten der Oberfläche auf nachgesintertem Zirkonoxid mit speziellen Diamanten mit leichten Schnitteigenschaften bei einer Umdrehung von optimal 15.000 – maximal 20.000 Umdrehungen/min. Dünnwandige Bereiche in den Randzonen lassen sich sehr gut ausarbeiten und ohne „Splitterungen“ definieren.



3. Politur des nachgesinterten Zirkonoxids mit extra- beziehungsweise mittelgrober Spezialscheibe aus diamantbesetztem Gummi bei einer Umdrehung von optimal 6.000 – maximal 20.000/min.



Fazit

Der zahntechnische Alltag wird durch die auf Zirkonoxid abgestimmten Instrumente von Argen erleichtert und unterstützt das wirtschaftliche Arbeiten. Bestellungen sind direkt im Argen Online-Shop, beim Außendienst oder telefonisch möglich. □

Kontakt

Argen Dental GmbH

Fritz-Vomfelde-Str. 12, 40547 Düsseldorf

Tel.: 0211 355965-0

Fax: 0211 355965-19

info@argen.de

www.argen.de

www.argen.de/shop/